




GEBRAUCHSANWEISUNG (III/Jan.17):

Blasenkatheterventil CareVent®
mit Verbindungsschlauch

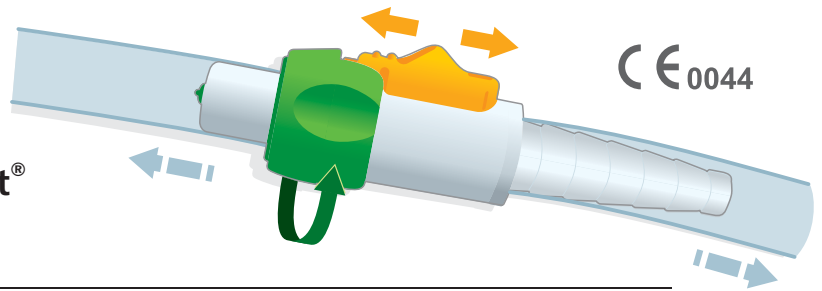


GENERELLE INFORMATION:

Das Produkt ist einzeln und steril (EO) verpackt und muss vor Licht geschützt an einem kühlen und trockenem Ort gelagert werden. Es ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden. Das Produkt darf nicht verwendet werden, falls das Produkt oder die Verpackung beschädigt sind.

BESCHREIBUNG:

Das Blasenkatheterventil CareVent® hat ein geringes Eigengewicht von ca. 6 Gramm. Es dient der vereinfachten und kontrollierten Harnableitung aus der Blase in einen Urinbeutel und/oder direkt in die Toilette.

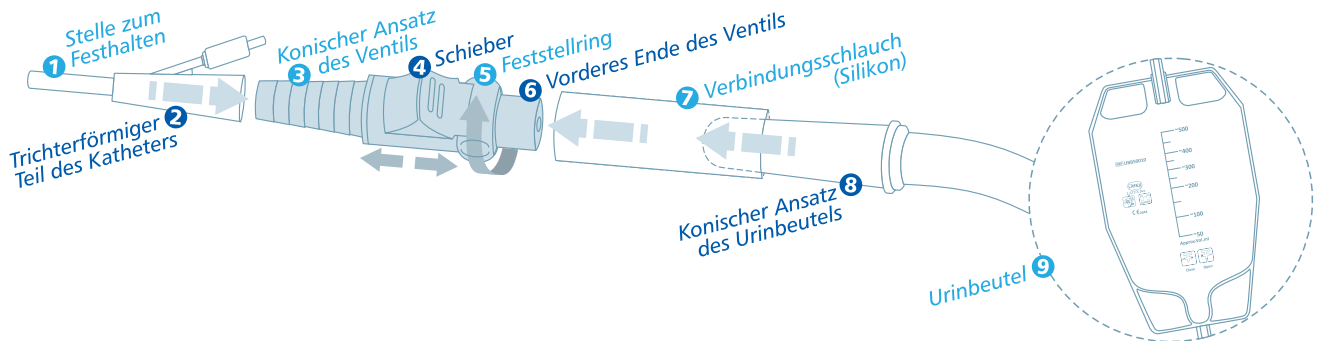

DESIGN:

Das CareVent® kann an eine der Komponenten und oder an alle Komponenten, wie in der o. a. Zeichnung abgebildet und im weiteren Kontext ersichtlich, angeschlossen werden. Die o. a. Zeichnung dient zum besseren Verständnis der Anwendung des CareVent®.

HINWEIS:

Bitte wenden Sie sich bzgl. weiterer, das CareVent® betreffender Einzelheiten an Ihren Arzt oder an uns.

Beachten Sie: Die Verwendung oben angeführter Produkte unterliegen heutigem medizinischen Standard beispielsweise in Bezug auf Indikationen, Kontraindikationen, Anwendung, etc. Bitte wenden Sie sich bzgl. weiterer Einzelheiten des CareVent® betreffend an Ihren Arzt und/oder an uns.

VORTEILE:

- Kein Nachtropfen
- Selbstschließendes Ventil
- Vereinfachte Handhabung, farbcodiert
- Geringes Gewicht (nur 6 Gramm)
- Rezeptierbares Hilfsmittel (patientenbezogen)

INDIKATION:

Blasenkatheterventil CareVent® nur zum externen Gebrauch und für die vereinfachte und kontrollierte Harnableitung aus der Blase in bspw. einen Urinbeutel oder direkt in die Toilette.

KONTRA-INDIKATION:

Das CareVent® darf nicht verwendet werden, wenn es nicht an andere Komponenten angeschlossen werden kann.

MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN:

- Sepsis/Infektionen

VORBEREITUNG:


- Verpackung auf Beschädigung überprüfen
- Entfernen des Produktes aus der Verpackung
- Produkt auf Beschädigung überprüfen

Beachten Sie: Das Produkt darf nicht verwendet werden, sollte die Verpackung oder das Produkt beschädigt sein.



GEBRAUCHSANWEISUNG (III/Jan.17):

Blasenkatheterventil CareVent®
mit Verbindungsschlauch

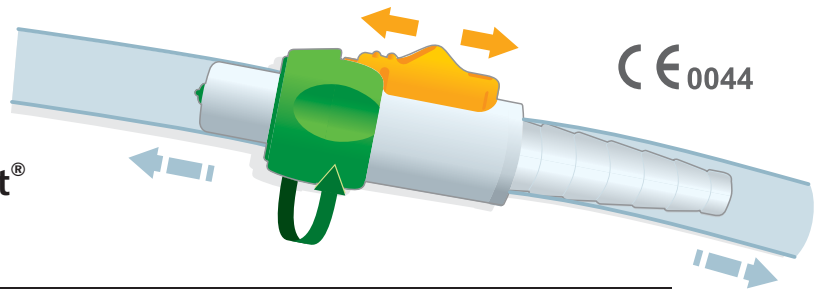

CE 0044

HANDHABUNG:

Auspacken

Beachten Sie bitte, dass dabei das CareVent® und der Verbindungsschlauch nicht auf den Boden fallen und somit verunreinigt werden.

Befestigung des CareVent® am Katheter

Führen Sie den konischen Ansatz des Ventils (3) bis zum Ende in den trichterförmigen Teil des Katheters (2) ein. Vergewissern Sie sich, dass der Schieber bei der Montage zu Ihnen zeigt, was die spätere Verwendung vereinfacht. **Beachten Sie:** Das CareVent® ist so konstruiert, dass es selbstständig im Katheter hält.

Entleerung der Harnblase im natürlichen Rhythmus

Zum Entleeren der Harnblase halten Sie das vordere Teil des CareVent® (6) über das Toilettenbecken oder in ein anderes ausreichend großes Gefäß und ziehen Sie den Schieber (4) in Richtung des Katheters zurück. Nach der Entleerung der Harnblase lassen Sie den Schieber (4) los, sodass sich das Ventil automatisch wieder schließt.

Verwendung des CareVent® während der Nacht

Zur Vermeidung des nächtlichen Toilettenganges können Sie das CareVent® mit dem beiliegenden Verbindungsschlauch (7) mit einem optional erhältlichen Urinbeutel (9) zur automatischen Harnableitung verbinden.

1. Führen Sie das vordere Ende des Ventils (6) bis zum Ende in den beigefügten Verbindungsschlauch (7) ein.
2. Führen Sie den konischen Ansatz des Urinbeutels (8) bis zum Ende in den beigefügten Verbindungsschlauch (7).
3. Überprüfen Sie die Stabilität der Verbindungen.
4. Ziehen Sie den Schieber (4) Richtung Katheter zurück, drehen Sie den Feststeller (5) eine viertel bis halbe Umdrehung nach links oder rechts, um die neue Position des Schiebers (4) zu sichern das Ventil offen zu halten und den Harn in den Urinbeutel ablaufen zu lassen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsschläuche nicht geknickt sind und somit den Urinfluss unterbrechen.
6. Morgens wird zuerst das Ventil geschlossen, indem der Feststeller (5) in die ursprüngliche Position zurückgedreht wird, bis der Schieber (4) in die vorgesehene Aussparung einrastet. Das Ventil ist jetzt geschlossen.
7. Ziehen Sie den Verbindungsschlauch (7) vom vorderen Ende des Ventils (6) ab, um den Urinbeutel vom Ventil abzukoppeln.

GENERELLE VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Das verpackte Produkt muss an einem trockenen Platz bei einer Temperatur zwischen 0 °C and 30 °C gelagert werden.
- Das verpackte Produkt muss vor direktem Tageslicht geschützt werden.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, sollte das Verfallsdatum auf der Verpackung überschritten sein.

ENTSORGUNG NACH GEBRAUCH:

Medizinische Produkte und deren Zubehör können nach ihrer Anwendung eine potentielle biologische Gefahr darstellen. Unter Einhaltung anerkannter medizinischer Vorgehensweisen und unter Beachtung der jeweilig gültigen örtlichen, lokalen, staatlichen und bundesweiten Regelungen, Bestimmungen und Gesetze sind daher die verwendeten medizinischen Produkte und deren Zubehör zu behandeln und zu entsorgen.

Achtung: Medithek GmbH Einzelprodukte und Sets sind untereinander kompatibel. Trotzdem muss der Anwender vor der Verwendung die Interkompatibilität der Produkte untereinander sicherstellen. Dies gilt im Besonderen, falls der Anwender Medithek GmbH Produkte im Zusammenhang mit Produkten anderer Hersteller verwendet.

ZEICHENERKLÄRUNG:

	• Einmalgebrauch		• Chargennummer		• Bestellnummer		• Verfallsdatum		• Herstellernummer
	• Gebrauchsanweisung beachten		• Von Sonnenlicht fernhalten		• Trocken aufbewahren		• Kühl lagern		• Sterilisiert mit Ethylenoxid

Wir weisen darauf hin, dass gemäß der Zweckbestimmung unserer Produkte eine Wiederaufbereitung und/oder mehrmalige Verwendung nicht vorgesehen ist! Bei Wiederaufbereitung und/oder mehrmaliger Verwendung können Veränderungen der Funktionalität und eine Erhöhung von Risiken nicht ausgeschlossen werden!